

 SM DMT


МЫ СОЗДАЁМ
УЛЫБКИ,
КОТОРЫЕ ДАРЯТ
СЧАСТЬЕ



**КАТАЛОГ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ**



Рекомендации по сочетанию оттенков композитного материала SM Light*/ РеЛайт в зависимости от оттенка зубов и методики реставрации**

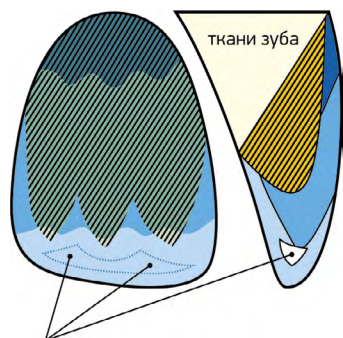

Мультипакетная полихроматическая методика реставрации


Оттенки композита SM Light*/ РеЛайт

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	C2	D3	OA2	OA3
A1	●	●				●					●	
A2		●	●				●				●	
A3			●				●	●				●
A3.5				●	●				●			●
A4					●	●			●			●
B1	●					●	●				●	
B2			●			●	●				●	
B3		●					●	●				●
B4					●		●	●				●
C1	●		●						●		●	
C2		●		●					●		●	
C3		●	●						●		●	
C4			●	●	●				●		●	
D2		●	●			●					●	
D3				●				●	●	●		●
D4					●			●	●			●

Шкала Vita Classical

Оттенок TC (Translucent Clear)***

- Дентин
- Шейка
- Тело
- Режущий край
- *** Участок повышенной прозрачности в области режущего края восстанавливают композитным материалом SM Light*/ РеЛайт TC (Translucent Clear)

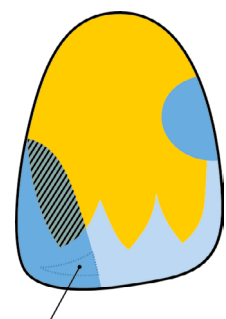

Оттенок TC (Translucent Clear)***

- Дентин (Опак)
- Эмаль (универсальный)
- Режущий край
- *** Участок повышенной прозрачности в области режущего края восстанавливают композитным материалом SM Light*/ РеЛайт TC (Translucent Clear)

Двухцветная методика

Оттенки композита SM Light*/ РеЛайт

	Универсальный (эмалевый) оттенок	Дентин-опаквый оттенок
A1	A1	OA2
A2	A2	
A3	A3	
A3.5	A3.5	OA3
A4	A4	
B1	B1	OA2
B2	B2	
B3	B3	OA3
B4	B3	
C1	C2	
C2	C2	OA2
C3	A3.5	OA3
C4	A4	
D2	A2	OA2
D3	D3	OA3
D4	B3	

Шкала Vita Classical

Одноцветная методика

Оттенки композита SM Light*/ РеЛайт

	Универсальный (эмалевый) оттенок
A1	A1
A2	A2
A3	A3
A3.5	A3.5
A4	A4
B1	B1
B2	B2
B3	B3
B4	B3
C1	C2
C2	C2
C3	A3.5
C4	A4
D2	A2
D3	D3
D4	B3

Шкала Vita Classical

* Новые наименования стоматологических материалов.

Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесенные изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

** Рекомендации разработаны и апробированы в лабораторных и клинических условиях на кафедре терапевтической стоматологии Смоленского государственного медицинского университета (Д.А. Глебова, А.И. Николаев, Т.А. Галанова)

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SM Light*/ РеЛайт

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ И БОКОВЫХ ЗУБОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Реставрация твердых тканей зуба (полости всех классов по Блэку)
- Восстановление культи зуба
- Шинирование
- Коррекция реставраций из композитов
- Изготовление не прямых реставраций (вкладки, накладки, виниры)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко полируется
- Не прилипает к инструменту
- Стабилен при моделировании
- Рентгеноконтрастен
- Флюоресцентен
- Широкий диапазон оттенков по шкале Vita Classical

3 ГРУППЫ СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТИ:

ОТТЕНОК ПОВЫШЕННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ TC (TRANSLUCENT CLEAR)

Для моделирования режущего края и придания реставрации оптического «эффекта глубины»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ЭМАЛЕВЫЕ) ОТТЕНКИ BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2

Обладают усредненной прозрачностью/опакностью между дентинными и эмалевыми оттенками

ДЕНТИН-ОПАКОВЫЕ ОТТЕНКИ OA2, OA3

Маскировочные оттенки для придания большей насыщенности реставрации, предотвращения сквозного просвечивания

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ:

- При эстетической реставрации передних и боковых зубов в большинстве клинических ситуаций достаточно использования только оттенков универсальной упаковки
- Опакные оттенки (OA2, OA3) следует применять при значительных дефектах дентина передних зубов, когда универсальных оттенков недостаточно для блокирования просвечивания темного фона полости рта и придания конечному цвету реставрации естественной теплоты
- Для имитации цветовых эффектов и индивидуальных цветовых особенностей зубов эффективно применение композитных красителей РеЛайт колор/ SM Light color*

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (4 г)

SM Light tempo, tempo flow*/ РеЛайт темпо, темпо флоу

КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Временная изоляция полостей при длительном эндодонтическом лечении
- Временная изоляция при микропротезировании
- Временная герметизация винта абатмента имплантата
- Блокирование поднутрений перед снятием оттиска
- Фиксация полимерной матрицы в межзубных промежутках при реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономит время
- Удобен в работе
- Плотное краевое прилегание
- Выдерживает жевательную нагрузку
- Легко удаляется единой порцией, не требуя высверливания

SM Light tempo*/ РеЛайт темпо

композит светового отверждения для временного пломбирования



наполненная бесцветная паста после отверждения

SM Light tempo flow*/ РеЛайт темпо флоу

текучий композит светового отверждения для временного пломбирования



текучая бирюзовая паста после отверждения

ФОРМЫ ВЫПУСКА: • паста в шприце (2,5 г) бесцветная или бирюзовая
• текучая паста в шприце (2,5 г) бесцветная или бирюзовая, насадки сменные (5 шт.)

* Новые наименования стоматологических материалов.

Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесенные изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Light color*/ РеЛайт колор

ОКРАШЕННАЯ НИЗКОВЯЗКАЯ СВЕТОТВЕРЖДАЕМАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАСТА

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индивидуализация особенностей зубов
- Естественность композитной реставрации
- Материал совместим со всеми светоотверждаемыми композитами и компомерами

Белый — имитация меловидных пятен при флюорозе, оптическое акцентирование бугорков и валиков эмали, маскировка пигментированных участков
Коричневый — имитация сильнопигментированных трещин эмали и фиссур жевательной поверхности боковых зубов

Серый — придание фиссурам боковых зубов тёмного оттенка
Охра — оптическое акцентирование пришеечной области передних зубов, имитация пигментации фиссур боковых зубов, тонирование дентина

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Глубина фотополимеризации до 0,2 мм
- После нанесения и фотополимеризации следует перекрывать эмалевыми оттенками композитного материала

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (1 г), насадки сменные (5 шт.)

SM Light bond*/ РеЛайт бонд

АДГЕЗИВ СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Прочное сцепление композита с тканями зуба, надежное краевое прилегание

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкое проникновение в дентинные канальца
- Эластичность и плотное краевое прилегание
- Высокая адгезия к тканям зуба (27 МПа)
- Легкая адаптация первого слоя композита
- Может использоваться с любыми светоотверждаемыми композитами в технике тотального травления эмали и дентина

ФОРМА ВЫПУСКА: • флакон (5 мл)

SM Light жидкость для моделирования*/ РеЛайт жидкость для моделирования

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Предотвращение прилипания композитной пасты к рабочим инструментам и улучшение адаптации композита к тканям зуба при моделировке

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие прилипания к рабочему инструменту
- Комфортная работа с высоконаполненными композитами
- Максимально гладкий верхний слой реставрации
- Оптимальная вязкость
- Прозрачная после отверждения
- Не содержит растворителей и НЕМА
- Совместима со всеми светоотверждаемыми композитами

ФОРМА ВЫПУСКА: • флакон (5 мл)

* Новые наименования стоматологических материалов.

Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Endo*/ Кальцетин Эндо

ПАСТА ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРООКСИ КАЛЬЦИЯ

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Необратимые формы пульпита
- Консервативное лечение всех форм хронических периодонтитов
- Алексификация и алексогенез

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходный антибактериальный эффект (рН > 12)
- Создание условий для роста и формирования корня зуба
- При необходимости паста легко извлекается из каналов
- Шприц с усиленным поршнем, удобным захватом и системой Luer Lock
- Ультратонкие насадки

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

- шприц (2 г), насадки сменные (3 шт.)
- шприц (2 г), насадки сменные (20 шт.)

SM Fill*/ Эвгетин

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Пломбирование корневых каналов зубов при лечении пульпита и всех форм периодонтита, особенно в случаях пломбирования корневых каналов с морфологическими изменениями
- Материал рекомендуется в качестве силера для совместного применения с гуттаперчей

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Значительное снижение периапикальной чувствительности (содержит дексаметазон — 0,01 %, гидрокортизона ацетат — 1 %)
- Легко смешивается и остается пластичным в течение 5–6 часов
- Мощный антисептик длительного действия — тимол йодид
- Плотное заполнение каналов и микроканалцев (толщина плёнки 3–5 мкм)
- Низкая растворимость (0,15 %) гарантирует продолжительную службу корневой пломбы
- Высокая рентгеноконтрастность

ФОРМА ВЫПУСКА:

- банка (14 г), флакон (10 мл), блокнот

SM MTA, SM MTA быстротвердеющий*/ Рутдент, Рутдент быстротвердеющий

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ РЕТРОГРАДНОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Пломбирование апикальной части канала с незавершённым формированием корня
- Ретроградное пломбирование канала при резекции верхушки корня зуба
- Закрытие перфораций корневого канала, а также в области би- и трифурнаций глубокой полости, при наружной резорбции корня зуба
- Лечебное покрытие пульпы для поддержания её витальности при лечении глубокого кариеса и всех обратимых форм пульпита
- Прямое покрытие пульпы после пульпотомии

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Твердеет в присутствии влаги, крови
- Контролируемое время отверждения
- Высокая механическая прочность
- Превосходная биосовместимость
- Низкая растворимость
- Высокая щёлочность (рН > 12) и микроцидность

Характеристики/ виды	SM MTA*/ Рутдент	SM MTA быстротвердеющий*/ Рутдент быстротвердеющий
Рабочее время	10–12 минут	2–4 минуты
Время твердения	4–24 часа	12–15 минут**
Прочность при сжатии, МПа	40±2	45±2
Растворимость, %	0,70	0,58
Значение рН	12,48	12,18

** Начальное время твердения

ФОРМЫ ВЫПУСКА:

- порошок (20 доз по 0,3 г), флакон для дистиллированной воды, блокнот для замешивания
- порошок быстротвердеющий (20 доз по 0,3 г), флакон для дистиллированной воды, блокнот для замешивания

* Новые наименования стоматологических материалов.

Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Fluor*/ Фтор-Люкс
ЛАК ФТОРИРУЮЩИЙ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Гиперчувствительность пришеечной зоны зуба
- › Гиперестезия препарированного под коронку «живого» зуба
- › Чувствительность зубов после реставрации, препарирования, снятия зубных отложений, полировки эмали или отбеливания зубов
- › Кариес зубов в стадии белого пятна
- › Профилактика кариеса молочных зубов, зубов «мудрости»
- › Защита фиссур в период их развития

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Быстрое образование фторирующей плёнки мгновенно снижает болевые ощущения у пациента
- › Уникальное сочетание аминфторида, фторидов кальция и натрия ускоряет реминерализацию и укрепляет эмаль
- › Высокая концентрация фторид-ионов обеспечивает пролонгированное действие

ФОРМА ВЫПУСКА: • флакон (13 мл)

SM Fluor*/ Фтор-Люкс
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ФТОРИРОВАНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Профилактика кариеса молочных и постоянных зубов
- › Профилактика кариозных поражений эмали в области несъёмных ортодонтических конструкций (брекетов)
- › Реминерализующая терапия при кариесе зубов в стадии меловидного пятна
- › Устранение гиперестезии твёрдых тканей зубов, в том числе после проведения профессиональной чистки зубов
- › Обработка твёрдых тканей зубов при лечении пародонтита и пародонтоза
- › Обработка глубоких кариозных полостей перед реставрацией зубов композитными материалами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › За счет особого механизма взаимодействия компонентов материала образование микрокристаллов фтористого кальция, магния и меди происходит непосредственно в самом дефекте, поэтому они не счищаются зубной щёткой
- › Высокое содержание микрокристаллов фторидов в дефекте обеспечивает пролонгированный эффект
- › Для достижения эффекта глубокого фторирования достаточно одной процедуры
- › Оптимальное соотношение компонентов в жидкости и суспензии позволяет проводить глубокое фторирование и эмали, и дентина в отличие от импортных аналогов, где для глубокого фторирования эмали и дентина применяется два разных материала

ФОРМА ВЫПУСКА: • жидкость (10 мл), суспензия (10 мл)

FlowStream Comfort, FlowStream
ПОРОШОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ



FlowStream Comfort с уменьшенными частицами до 40 мкм!



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

FlowStream Comfort:

- › комфортное удаление наддесневой биоплёнки, плотного пигментированного налёта и пятен, а также слабоминерализованных зубных отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня
- › очистка фиссур перед герметизацией и щадящая обработка эмали, не приводящие к гиперестезии зубов

FlowStream:

- › Удаление налёта и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов
- › Очистка фиссур перед герметизацией
- › Удаление пигментаций, налёта курильщика
- › Щадящее механическое отбеливание эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Щадящее удаление налёта, мягких зубных отложений, пигментаций, отбеливание зубов
- › Не приводит к гиперестезии зубов
- › Порошок состоит из сферических частиц, «выметающих» из дефекта, и абразивных частиц колотой формы, очищающих поверхность твёрдых тканей

6 ВКУСОВ:
экзотик, апельсин, лимон, вишня, кола, нейтральный

ФОРМЫ ВЫПУСКА: • порошок 40 мкм (300 г)
• порошок 65 мкм (300 г)

* Новые наименования стоматологических материалов. Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.

SM Shine №1
ПАСТА ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Быстрое размягчение и удаление зубного камня без повреждения эмали
- › Зелёный цвет пасты позволяет осуществлять визуальный контроль нанесения
- › Легко смывается водно-воздушной струей
- › Приятный освежающий вкус

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Shine №2
ПАСТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭМАЛИ ПЕРЕД РЕСТАВРАЦИЕЙ, ОТБЕЛИВАНИЕМ ЗУБОВ И УДАЛЕНИЯ МЯГКОГО НАЛЁТА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Обработка эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур, для удаления мягкого налёта, пелликулы, а также для профилактики кариеса (профессиональная чистка зубов)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Эффективная профессиональная щадящая чистка эмали
- › Качественное удаление мягкого налёта и пелликул в труднодоступных местах и фиссурах
- › Консистенция пасты предотвращает её разбрызгивание в процессе работы
- › Легко смывается водно-воздушной струей
- › Приятный освежающий вкус

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Shine №3
ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ И СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Окончательная обработка пломб из композитных и стеклоиономерных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Качественная обработка пломб без повреждения здоровых тканей зуба
- › Удобное нанесение
- › Отличная смываемость водой
- › Эффект «сухого» блеска

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (3 мл)

SM Etch*/ Травлин
ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- › Травление эмали и дентина, применяемое в технологии кислотного травления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- › Контрастный цвет геля для контроля нанесения
- › Оптимальная консистенция для точечного нанесения
- › Быстрое удаление смазанного слоя
- › Легко и полностью смывается водно-воздушной струей
- › Простота в применении

ФОРМА ВЫПУСКА: • шприц (5 мл), насадки сменные (3 шт.)

* Новые наименования стоматологических материалов. Обращаем Ваше внимание, компания «СМ-Инвест» изменила наименования стоматологических материалов. Во время переходного периода в продаже будет продукция со старыми и новыми наименованиями. Внесённые изменения не влияют на качество и эффективность материалов.



 8 (4722) 777-191

 www.smdmt.com

 info@smdmt.com

 [smdmt_official](#)

 [smdmt_official](#)