
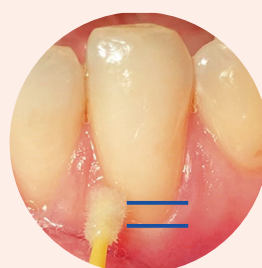


ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ

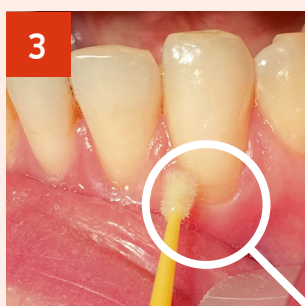

Рецессия десны 3 мм

ДИАГНОЗ:

Пациентка, 36 лет.

Жалобы на кратковременную боль от температурных раздражителей в пришеечной области зуба 3.3.

DS: 3.3 — гиперестезия твёрдых тканей.

1 — полирование эмали зубов пастой **SM Shine® №2**, не содержащей фтор

2 — тщательное высушивание эмали тёплой воздушной струёй, нанесение **жидкости SM Fluor®** для глубокого фторирования и выдерживание в течение 30 секунд

3 — нанесение и втирание **суспензии SM Fluor®** для глубокого фторирования в течение 30 секунд, промывание поверхности водой

Комментарий автора:

Через 1 неделю процедура была проведена повторно, пациент отмечает отсутствие гиперестезии при воздействии термических раздражителей в области зуба 3.3

Благодарим за предоставленный материал Аймалетдинову З. Т., врача-стоматолога, ассистента кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний РУДН