


КОМПОЗИТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

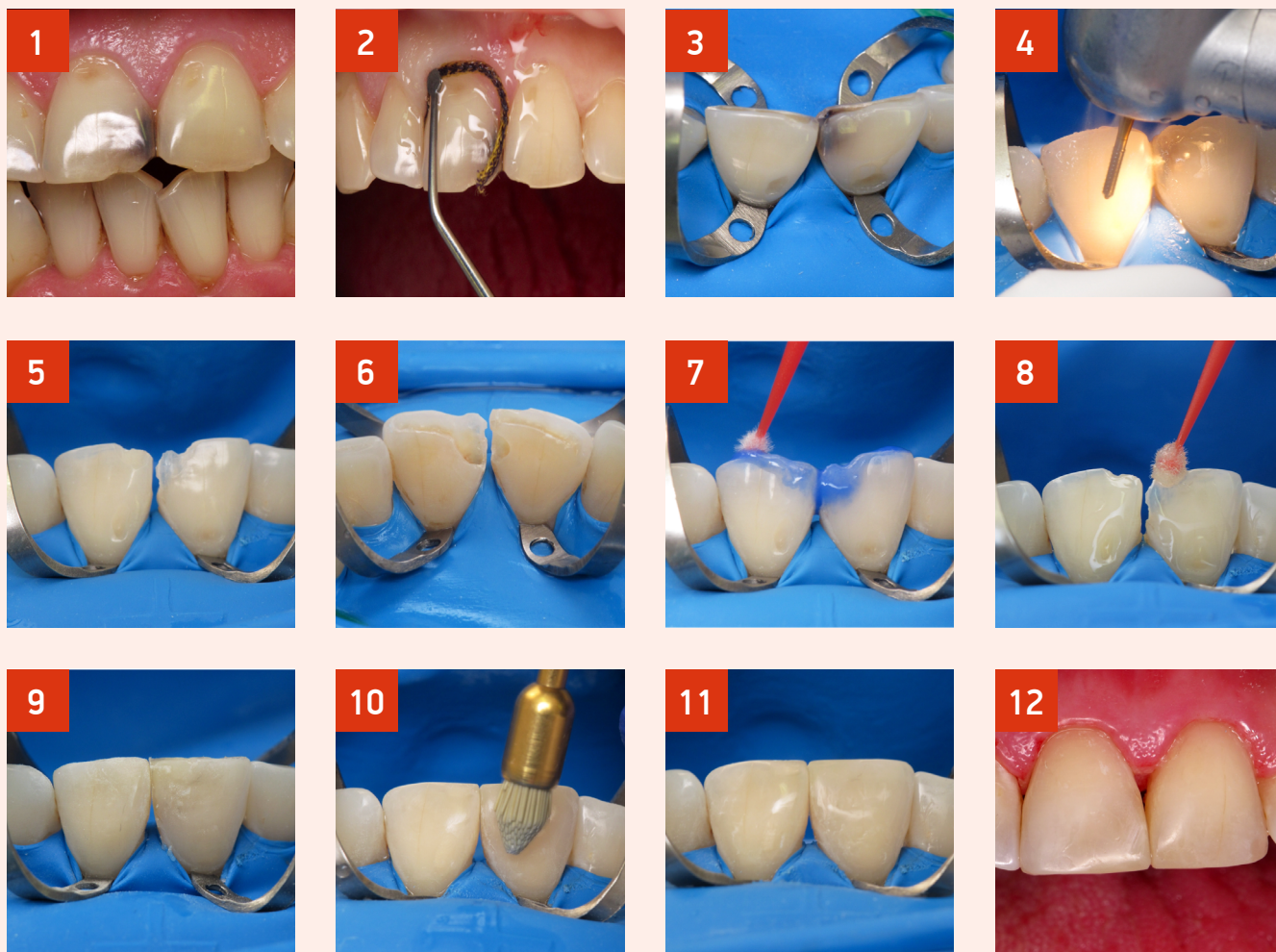

ДИАГНОЗ:

11, 21 — средний кариес (IV класс по Блеку), эрозии эмали (V класс по Блеку)

Пациентка М., 46 лет

- 1 — исходная ситуация
- 2 — ретракция десны
- 3 — изоляция рабочей области с применением коффердама (OptiDam) и клампов Бринкера В4
- 4 — препарирование дефектов твёрдых тканей зубов
- 5, 6 — вид отпрепарированных дефектов в области углов коронок и пришеечной области зубов 11 и 21
- 7 — тотальное (динамичное) протравливание, медикаментозная обработка 2%-ным спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата
- 8 — нанесение адгезива **SM Light® bond**
- 9 — зубы восстановлены композитным материалом **SM Light®**: углы коронок (ОА2, А2), пришеечная область (А3), цветокорректор **SM Light® color охра**, жидкость для моделирования **SM Light®**
- 10 — шлифование и полирование реставраций пастами **SM Shine® №2** и **SM Shine® №3** при помощи полировочных щёточек
- 11 — вид зубов после шлифования и полирования
- 12 — вид зубов после удаления коффердама и ретракционных нитей

Благодарим за предоставленный материал Николаева А. И., заведующего кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского государственного медицинского университета