

SM Light® tempo flow

ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ПЛОМБИРОВАНИЯ

ТЕКУЧАЯ ПАСТА (2,5 г)




гибкий
ПОДХОД



ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
ТВЁРДОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ

Текучая бирюзовая паста
после отверждения

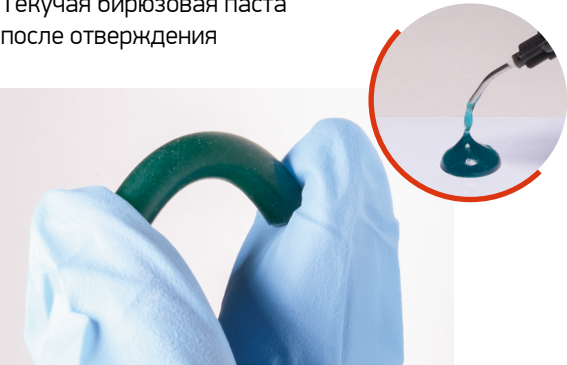

ЛЕГКО И ТОЧНО ВНОСИТСЯ
непосредственно
в подготовленную полость зуба
ЧЕРЕЗ СМЕННУЮ НАСАДКУ

Эластомер последнего поколения обеспечивает оптимальное сочетание упруго-эластичных и прочностных свойств материала. После световой полимеризации образуется стабильная трёхмерная сетчатая структура с «памятью формы».

Низкая усадка материала позволяет снизить полимеризационный стресс на границе пломба-зуб и избежать образования краевого зазора.

Отверждённый материал легко удаляется ручным стоматологическим инструментом единой порцией без повреждения границ препарированной полости (даже при наличии нависающих краёв).

ПОКАЗАНИЯ

- временная изоляция полостей при длительном эндодонтическом лечении
- временная изоляция при микропротезировании
- временная герметизация винта абатмента имплантата
- блокирование поднутрений перед снятием оттиска
- фиксация полимерной матрицы в межзубных промежутках при реставрации



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование показателя/ материал	SM Light® tempo flow		Temp it® ** (Spident, Корея)
Глубина полимеризации за 10 секунд, мм (LED лампа — 1200 мВт / см²)	10 бесцветная паста	7 бирюзовая паста	6
Растворимость, %	0,26		0,44
Водопоглощение, %	3,10		4,32
Твёрдость (Шору А)***	88,0		93,1

* Результаты внутренних лабораторных исследований отдела разработок компании «СМ-Инвест»

** Не является торговой маркой компании «СМ-Инвест»

*** Характеристика упруго-эластичных материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плотное краевое прилегание
- Выдерживает жевательную нагрузку
- Легко удаляется единой порцией, не требуя высверливания, что сокращает время реставрации



РЕКОМЕНДАЦИИ
ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ

- Для улучшения герметичности временной пломбы перед внесением пасты стенки полости следует обработать адгезивом SM Light® bond
- Для смачивания инструмента и улучшения адаптации светоотверждаемых композитных реставраций рекомендуется использовать жидкость для моделирования SM Light®
- Временная пломба бирюзового цвета является дополнительным напоминанием пациенту о необходимости продолжения лечения



МНЕНИЕ ВРАЧА

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ



Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского государственного медицинского университета, практикующий врач стоматолог-терапевт



Текущий светоотверждаемый композит для временных пломб — важный компонент оснащения стоматолога, проводящего эндодонтическое лечение.

В своей практике я использую **SM Light® tempo flow**. Этот материал в двух вариантах исполнения: контрастная бирюзовая паста, которая позволяет мне хорошо видеть границу временной пломбы и зуба, и бесцветная паста, удобная при работе в эстетически значимой области.

Длительное сохранение временной пломбы — одно из преимуществ данного материала.

Ещё один немаловажный плюс: композитный материал **SM Light® tempo flow** не нейтрализует гидроксид кальция, в отличие от цемента, а также не нарушает полимеризацию композитных материалов, в отличие от цинкоксида-эвгенольных материалов.

Для улучшения краевого прилегания временной пломбы рекомендую предварительно смазать стенки полости адгезивом **SM Light® bond**, высушить и полимеризовать его, а затем внести **SM Light® tempo flow**.



МНЕНИЕ ВРАЧА

МАХОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ



Врач-стоматолог, авторская клиника эстетической и функциональной стоматологии «Софи-Дент», г. Белгород



Материал **SM Light® tempo flow** удобен в работе. Пастой можно легко заполнить полость, непосредственно, из шприца и быстро отвердить за 10–20 секунд. Закрывал полости по I классу от 1 до 2 недель. Пломбы стабильны: не крошатся, не меняют цвет, не визуализируется прокрашивание полости «цветной» пищей. Удаляются легко зондом. Доработка полости не требуется.

 +7 (906) 600 59 01

 www.smdmt.com

 info@smdmt.com

